



## Máscara facial

### AirFit F20 Quiet



MAGN



NO MAGN



La mascarilla facial **AirFit F20 Quiet** es una mascarilla facial adaptable y confortable que utiliza el sistema de ventilación **QuietAir** para hacerla más silenciosa y suave. Está disponible en dos modelos: uno con cierre magnético que facilita su colocación y ajuste, y otro sin imanes, ideal para pacientes con **contraindicaciones al uso de componentes magnéticos**. Es un accesorio no invasivo diseñado para canalizar el flujo de aire, con o sin oxígeno suplementario, desde un equipo de presión positiva en la vía aérea (PAP), adecuado para pacientes de más de 30 kg (66 lb) a quienes se les haya prescrito tratamiento con presión positiva. Está diseñada para ser utilizada repetidamente por un único paciente en su domicilio o para ser reutilizada en múltiples pacientes en entornos hospitalarios o institucionales, proporcionando comodidad y eficacia en el tratamiento de la apnea del sueño y otras condiciones respiratorias.

| Descripción de producto | Referencia                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máscara facial.         | AirFit F20 Quiet   |

| Especificaciones técnicas |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Presión de terapia        | 3-40 cm H <sub>2</sub> O |
| Válvula de seguridad abre | ≤3 cm H <sub>2</sub> O   |
| Material almohadilla      | Silicona                 |
| Tubo                      | Polipropileno            |
| Codo                      | Polycarbonato            |
| Tallas                    | S / M / L                |

| Certificado |                |
|-------------|----------------|
| Certificado | ISO 17510:2015 |

| Garantía |          |
|----------|----------|
| Garantía | 90 días. |

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).




### Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.



Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 15 cm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Esta advertencia es válida para el paciente o cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con su mascarilla. Los imanes se encuentran en el armazón y en los clips de las correas inferiores del arnés, con una fuerza del campo magnético de hasta 400 mT. Cuando se utiliza la mascarilla, se unen para sujetarla, aunque pueden desprenderse inadvertidamente mientras duerme. Los implantes/dispositivos médicos, incluidos los que se enumeran en las contraindicaciones, pueden verse afectados negativamente si se altera su funcionamiento debido a campos magnéticos externos (algunos implantes metálicos, como lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas craneales metálicas, tornillos, cierres de craneotomías (trépano) y dispositivos de sustitución ósea).

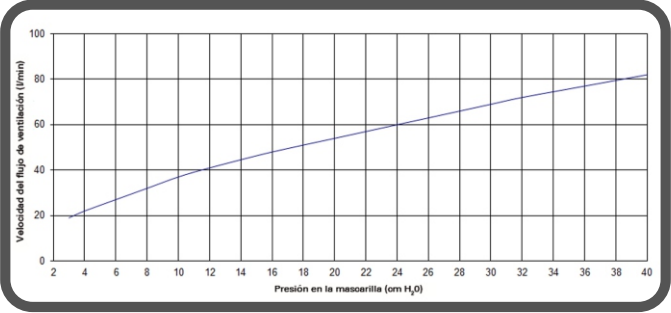

### Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.



### Limpieza de AirFit F20 Quiet.

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F20 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



### Cómoda.

Cómoda y poco invasiva al carecer de sujeción frontal.

Sujeto a cambios técnicos

**Comprometidos con su Salud y Bienestar**

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

**IPSO**  
MEDICAL  
Pensando en las Personas