



Máscara nasal
AirFit N30 i Quiet



La mascarilla nasal **AirFit N30i Quiet** está diseñada para ofrecer una experiencia de terapia **CPAP** cómoda y flexible. Con su innovador diseño de tubo superior, permite a los usuarios moverse libremente y dormir en cualquier postura sin preocuparse por enredos o restricciones. Su almohadilla nasal de bajo perfil garantiza un sellado eficaz sin cubrir gran parte del rostro, brindando comodidad y reduciendo las marcas en la piel.

Equipada con tecnología **QuietAir™**, esta mascarilla es increíblemente silenciosa, asegurando un entorno tranquilo para el usuario y su compañero de sueño. Además, su arnés ajustable y diseño intuitivo facilitan su colocación y ajuste, adaptándose a diferentes necesidades y tamaños. La **AirFit N30i** es la opción ideal para quienes buscan combinar eficacia, movilidad y comodidad en su terapia **CPAP**, mejorando su calidad de sueño y bienestar.


Descripción de producto	Referencia
Máscara nasal.	AirFit N30 i Quiet

Especificaciones técnicas	
Presión de terapia	4-25 cm H ₂ O
Caída de presión medida.	50 a 100 l/min. 0.5 a 1.7 H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Codo	Polycarbonato
Tallas	M / W

Certificado	
Certificado	ISO 17510:2015

Garantía	
Garantía	90 días.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).

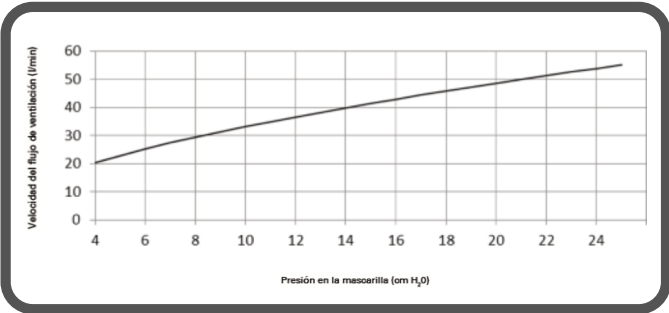

Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.




Limpieza de AirFit N30 i Quiet.

El mantenimiento de la mascarilla nasal AirFit N30 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.

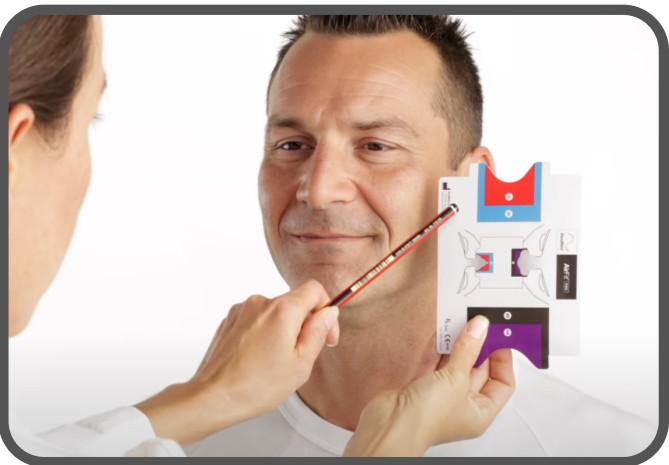

Selección de tamaño.

La opción de tamaño más cómodo será el que mejor se adapte a usted.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

