



## Máscara facial AirFit F30 i



La **ResMed AirFit F30i** es una mascarilla facial compacta diseñada para brindar una experiencia de terapia **CPAP** cómoda, eficaz y con total libertad de movimiento. Su innovador diseño incorpora un tubo de conexión en la parte superior de la cabeza, lo que evita enredos y permite cambiar de posición al dormir sin restricciones, mientras que su almohadilla **UltraCompact™** se adapta debajo de la nariz y sobre la boca, proporcionando un sellado hermético sin cubrir en exceso el rostro ni dejar marcas en la piel. Gracias a su tecnología **QuietAir™**, reduce significativamente el ruido, creando un ambiente de sueño tranquilo tanto para el usuario como para su pareja. Compatible con la mayoría de las máquinas CPAP, esta mascarilla ofrece una integración sencilla en cualquier régimen de terapia, destacándose por su facilidad de uso, ajuste intuitivo y diseño minimalista que garantiza comodidad durante toda la noche. Si buscas una mascarilla facial que combine funcionalidad, confort y un diseño moderno que mejora la calidad del sueño, la AirFit F30i es una opción ideal para transformar tu experiencia con la terapia CPAP.

| Descripción de producto | Referencia   |
|-------------------------|--------------|
| Máscara facial.         | AirFit F30 i |

| Especificaciones técnicas |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Presión de terapia        | 4-30 cm H <sub>2</sub> O                   |
| Caída de presión medida.  | 50 a 100 l/min. 0.2 a 1.0 H <sub>2</sub> O |
| Material almohadilla      | Silicona                                   |
| Tubo                      | Polipropileno                              |
| Codo                      | Polycarbonato                              |
| Tallas                    | S / M / sw / L                             |

| Certificado |                |
|-------------|----------------|
| Certificado | ISO 17510:2015 |

| Garantía |          |
|----------|----------|
| Garantía | 90 días. |

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).




### Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.




Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 15 cm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Esta advertencia es válida para el paciente o cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con su mascarilla. Los imanes se encuentran en el armazón y en los clips de las correas inferiores del arnés, con una fuerza del campo magnético de hasta 400 mT. Cuando se utiliza la mascarilla, se unen para sujetarla, aunque pueden desprenderse inadvertidamente mientras duerme. Los implantes/dispositivos médicos, incluidos los que se enumeran en las contraindicaciones, pueden verse afectados negativamente si se altera su funcionamiento debido a campos magnéticos externos (algunos implantes metálicos, como lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas craneales metálicas, tornillos, cierres de craneotomías (trépano) y dispositivos de sustitución ósea).

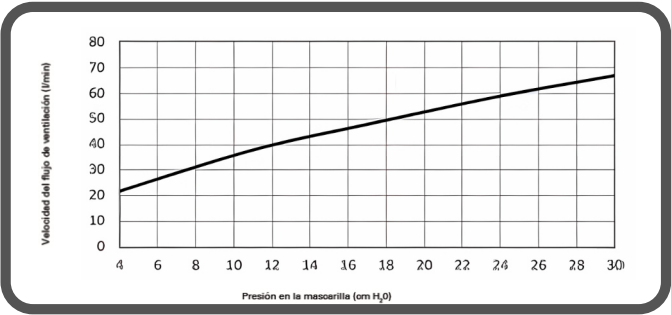

### Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.

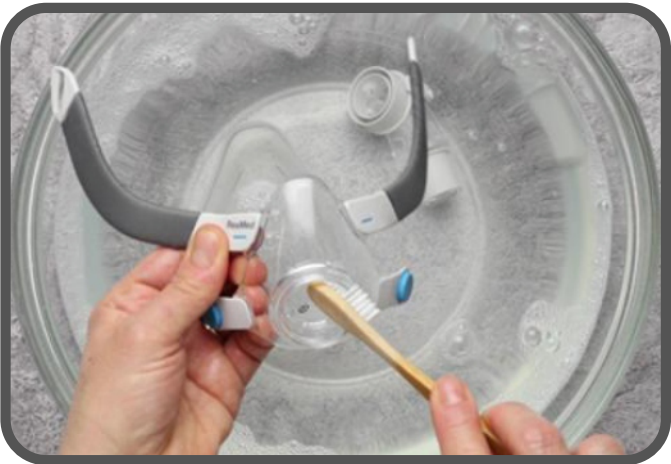

### Limpieza de AirFit F30 i.

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F30 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



### Selección de tamaño.

La opción de tamaño más cómodo será el que mejor se adapte a usted.

Sujeto a cambios técnicos

**Comprometidos con su Salud y Bienestar**

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

